

## Le Tableau des distances de vision C.A.S.A. (Test de la distance)

Tester les différences de vision, un œil à la fois et avec les deux yeux ouverts.

Le test de vision C.A.S.A. est un tableau des distances en trois couleurs dont le but est de détecter les changements de la vision. Les couleurs de fond utilisées dans ce tableau sont le vert, le rouge et le jaune. Ce sont les couleurs de diagnostic impliquées dans l'aberration chromatique de l'œil.

Voir plus clair dans le rouge peut signifier un changement au niveau de la myopie avec ou sans astigmatisme. Voir plus clair dans le vert peut indiquer un changement hypermétrope avec ou sans astigmatisme. Voir plus clair dans le jaune peut indiquer un changement d'astigmatisme mixte.

N.B. Voir clair dans toutes les couleurs ne veut pas dire que la vision est normale. Certaines anomalies visuelles peuvent encore exister. Cette technique de test visuel ne remplace pas un examen approfondi. C.A.S.A. Vision recommande une visite annuelle chez un professionnel de la vue.

©Droits d'auteur C.A.S.A. Vision Inc. 2012

C.A.S.A. Vision Inc., ses membres et ses filiales déclinent toute responsabilité pour tout conseil, de diagnostic ou d'autres informations ou services que vous obtenez sur cette brochure (y compris nos sites Web).

[www.casa-vision.com](http://www.casa-vision.com) • [www.casavisioneyechart.com](http://www.casavisioneyechart.com)

**UNE VISION EMBROUILLÉE PEUT AUSSI ÊTRE ASSOCIÉE À D'AUTRES MALADIES OCULAIRES.**

## Comment utiliser le tableau des distances de vision C.A.S.A. (Screener)

(Répétez pour chaque œil)

Note : Si vous portez des lunettes de prescription (ou lentilles cornéennes), assurez-vous de les porter lorsque vous ferez le test de la vision C.A.S.A.

Positionnez-vous à 10 pieds (3 mètres) du tableau des distances de vision.

- Regardez les lettres (mots) de chaque couleur un œil à la fois, en couvrant l'autre œil avec votre main.
- Assurez-vous de focaliser sur la clarté des lettres (mots) dans chaque couleur.
- Si les lettres (mots) sont embrouillés dans une couleur ou plus, il est possible que votre vision ne soit pas apte à la conduite automobile. Consultez votre ophtalmologiste.

**SI LES LETTRES (MOTS) SONT PLUS CLAIRES DANS LA COULEUR VERTE, (OU EMBROUILLÉES DANS LA COULEUR ROUGE) CONTACTEZ VOTRE OPHTALMOLOGISTE IMMÉDIATEMENT SI VOUS AVEZ DÉJÀ ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉ AVEC UNE DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA).**



## C.A.S.A. Vision

Outil diagnostique

==== (AUTO-TEST) =====

### NOTE :

N'utilisez que votre prescription la plus récente si vous portez des lunettes ou des lentilles cornéennes corrigeant votre vision de loin.

## RECOMMANDÉ POUR LE SUIVI DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA)

**CETTE PROCÉDURE DE DÉPISTAGE PEUT ÊTRE UTILISÉE DE FAÇON QUOTIDIENNE**

LICENCE ÉTABLIE 4310

SANTÉ CANADA DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE 1  
FDA

2729 rue Villeray, Montréal, Québec, Canada H2A 1E4  
Pour plus d'information : [www.casavisioneyechart.com](http://www.casavisioneyechart.com)